

NSK
CREATE IT.



ALLÁ DONDE SE NECESITE.

Tratamientos odontológicos a domicilio más cómodos y avanzados.

En una sociedad en la que el número de personas mayores crece rápidamente, cada vez es más necesario poder ofrecer tratamientos dentales móviles.

En la actualidad, las personas de la tercera edad conservan más piezas naturales, por lo que se hace indispensable contar con una amplia gama de tratamientos que estén más cercanos al paciente. VIVA ace concentra la funcionalidad de una clínica odontológica en un dispositivo compacto con micromotor polivalente, escarificador ultrasónico y mucho más. Su diseño ligero lo hace fácil de transportar e instalar en distintos sitios. Gracias a su gran funcionalidad, este dispositivo permite llevar tratamientos dentales más cómodos allá donde se encuentre el paciente.



Dispositivo ligero y compacto



Alta funcionalidad, similar a la de una clínica dental



Montaje e instalación sencillos






Dispositivo ligero y compacto

Altamente maniobrable, con sus escasos 8,6 kg, resulta extremadamente ligero. Su tamaño compacto es ideal para llevar en el coche, transportarlo por las escaleras o ubicarlo sin problemas en espacios pequeños. Además, es fácilmente trasladable de un lugar a otro, según las necesidades del paciente. Su tamaño reducido se debe a que sus componentes han sido escogidos entre los más ligeros y compactos del mercado, sin comprometer en ningún momento la funcionalidad.

Todo en uno

Dispositivo integrado con micromotor, escarificador ultrasónico, jeringa 3 en 1 y eyector, combinados en un dispositivo que incluye espacio para guardar todo el instrumental.

Tan solo 8,6 kg* de peso; transportable allí donde se necesite.

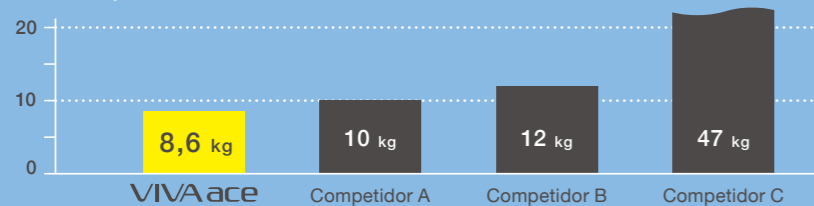

* Peso sin piezas de mano

Alto 28,4 cm
Ancho 29,8 cm
Largo 46,2 cm



Funcionalidad avanzada en un modelo compacto

Panel de control intuitivo de fácil lectura



Pedales




*Fotografías de extras opcionales.



Sistema odontológico portátil de alta funcionalidad, similar a la que ofrece una clínica dental

El panel de control con pantalla LCD grande, de uso intuitivo y fácilmente legible, junto a la magnífica funcionalidad aportada por cada uno de sus instrumentos, garantizan la máxima eficiencia y seguridad. Un sistema de alta funcionalidad, similar a la que ofrece una clínica dental.

Micromotor de alta funcionalidad

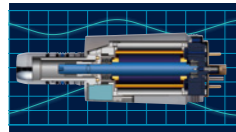

Adaptado a todas las exigencias de la odontología de vanguardia

Con nuestra exclusiva tecnología de control vectorial de par dinámico de 180 grados, es posible alcanzar una potencia elevada y una rotación fluida a altas y bajas velocidades por igual. Especialmente adaptado a las exigencias de la práctica odontológica.

Funcionalidad completa para endodancias

Rango de par de 0.3 – 3.0 Ncm, incluidas las funciones de parada y rotación inversa automáticas para el tratamiento endodóncico. Este tratamiento puede realizarse con un contra-ángulo de transmisión directa (1:1).

	Velocidad de rotación (min ⁻¹)	Torque (Ncm)
Modo General	1.000 ~ 40.000	4,0
Modo Endodancia	100 ~ 5.000	0,3~3,0



NLXplus



Modo General



Modo Endodancia

Escarificador ultrasónico polivalente



Motor ultrasónico iPiezo de NSK

Transmite la potencia apropiada a la punta para adaptarse a las condiciones del diente, tanto en casos de sarro blando como endurecido. iPiezo permite una escarificación segura, incluso al eliminar sarro duro.



Completísima gama de puntas

NSK ofrece más de 70 puntas para optimizar los tratamientos en diversos procedimientos clínicos, desde la eliminación de caries al tratamiento endodóncico o la limpieza bucal.



Varios2 Lux



Modo Escarificador

Jeringa 3 en 1



Jeringa 3 en 1 ligera y de fácil manejo. La boquilla de la jeringa cuenta con un mecanismo de liberación rápido y sencillo.

Eyector



Válvula de esfera integrada para ajustar la potencia de eyección.

Pedales

Para tratamientos realizados por un solo profesional

El micromotor, el escarificador ultrasónico y el eyector pueden encenderse y apagarse con un único pedal, usando el modo Sync.




Micromotor, escarificador y eyector

Para tratamientos realizados por dos operadores: un dentista/higienista y un auxiliar

El micromotor, el escarificador ultrasónico y el eyector pueden encenderse y apagarse, usando dos pedales. La combinación de ambos permite al odontólogo concentrarse en manejar el micromotor y el escarificador.



Micromotor y escarificador

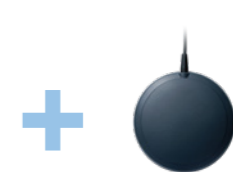

eyector

Sonda de luz (opcional)

Potente iluminación de la cavidad oral en cualquier entorno de tratamiento. Su cuerpo delgado permite una buena accesibilidad y hace posible llegar a zonas de difícil visibilidad.



isoE-LUX









Instalación y almacenamiento rápidos

El aparato es muy simple y rápido de instalar y guardar, sin ninguna complicación, lo que hace el trabajo más eficiente y sencillo.


El brazo articulado y los soportes de los instrumentos pueden colocarse a 4 niveles diferentes.

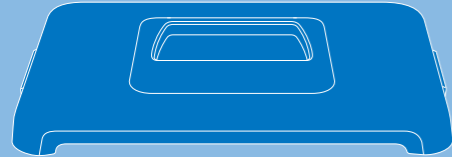

Muy higiénico, ya que los componentes que tocan el suelo se guardan en un compartimento separado con tapa.

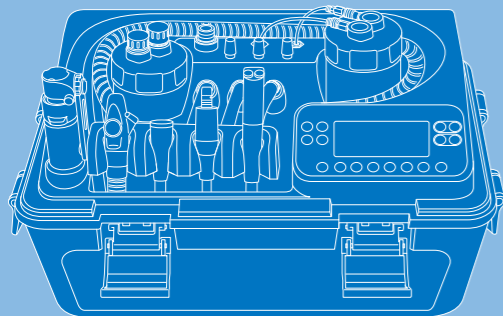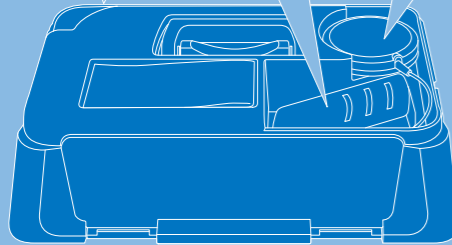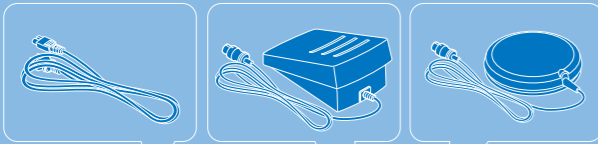

ABRIR

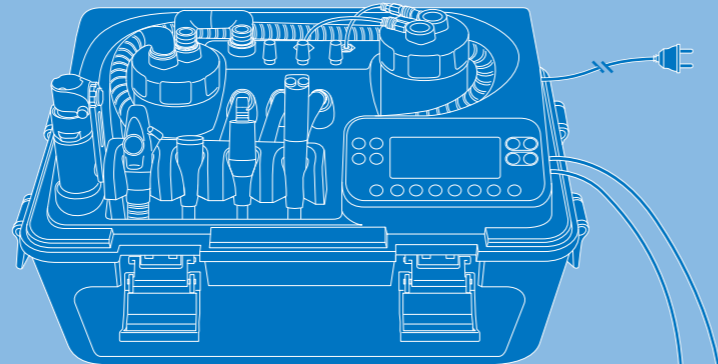

INSTALAR



Altura y ángulo ajustables a 4 niveles

Ajustable en varias posiciones, ya sea de pie o sentado.



Fácil de guardar

Retirar las piezas de mano para guardarlo más fácilmente



Fácil de mantener

ACOMODAR

VIVA ace Set completo

MODELO Set completo de VIVA ace 230

CODIGO DE PEDIDO Y1003773

Contenido

- Set básico VIVA ace 230
- Kit de micromotor VIVA ace
- Kit de escarificador VIVA ace



Especificaciones (unidad de control)

- Dimensiones : L 462 x An 298 x Al 284 mm
- Peso de la unidad : 8,6 kg
- Fuente de alimentación : CA 100-240 V 50/60 Hz
- Potencia de entrada : 130 VA

MODELO Set básico VIVA ace 230

CODIGO DE PEDIDO Y1003774



Contenido

- Unidad de control
- Cable de alimentación AC
- Pedal (FC-76S)
- Pedal (FC-70S)
- Tapa
- Set de manguera de eyección V-ace
- Set de depósito de eyección V-ace
- Boquilla del eyector V-ace (10)
- Set de depósito de agua V-ace
- Set de jeringa 3 en 1 V-ace
- Tira de sujeción al hombro

MODELO Kit de micromotor VIVA ace

CODIGO DE PEDIDO E1040002



Contenido

- Motor NLX plus
- Cable de micromotor
- Tapa de micromotor
- Conector de protección

MODELO Kit de escarificador VIVA ace

CODIGO DE PEDIDO E351006



Contenido

- Pieza de mano VA2-LUX
- Cable del escarificador
- Punta (G6, G8)
- Llave para punta
- Soporte para puntas

OPCIONAL

MODELO	PRODUCTO	CODIGO DE PEDIDO
Z95L	Contra-ángulo multiplicador 1:5, general	C1034
Z25L	Contra-ángulo de transmisión directa 1:1, general	C1038
X65L	Pieza de mano de transmisión directa 1:1, recta	H273

MODELO	PRODUCTO	CODIGO DE PEDIDO
X57L	Depósito de agua para irrigación V-ace	C609
isoE-LUX		Z1265
Boquilla de eyección V-ace (10 unidades)		S900070

REPUESTOS

MODELO	PRODUCTO	CODIGO DE PEDIDO
Set de manguera de eyección V-ace		U1144074
Set de depósito de eyección V-ace		U1146070
Set de depósito de agua V-ace		U1144040
Boquilla de jeringa 3 en 1 V-ace		U1144046
Manguera de conexión de eyector V-ace		U1144753
Tapa de eyector A		U1144750
Tapa de eyector B		U1144751
Tapa de manguera		U1144752
V-ace Set de Botella para Agua		U1146080

MODELO	PRODUCTO	CODIGO DE PEDIDO
FC-76S		Z1082005
FC-70S		Z1008006
Cable de alimentación		U439550
Tira de sujeción al hombro V-ace		U1144370
Junta (Para botella de agua)		U1144729
Junta (Para botella de vacío)		U1144636
Junta (Para botella de vacío)		Z1137352
Filtro		U1144727